

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

SN3000-PMH

Nombre de la institución: E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

Dirección: Calle 28 # 15-120

Municipio: DUITAMA

Fecha de Elaboración: Enero 2020

Vigencia: 2020

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomedico: \$ 80.000.000

Nombre del equipo	Ubicación	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsables	Actividades
				DD	MM	AA		
Unidad odontológica RITTER EXCELLENCE	Consultorio odontología Servicio Extramural Avendaños 1	2280	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
Balanza electrónica pesabebés HEALTH O METER 522KL	Consultorio medicina Servicio Extramural Avendaños 1	2568	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

Balanza electrónica HEALTH O METER 349KLX	Consultorio medicina Servicio Extramural Avendaños 1	178	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Tensiómetro de pared ALPK2 PARED	Consultorio medicina Servicio Extramural Avendaños 1	1687	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Lámpara cuello de cisne KRAMER N.R.	Consultorio medicina Servicio Extramural Avendaños 1	2139	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)

Negatoscopio ARDENT N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Avendaños 1	2691	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
Unidad odontológica RITTER EXCELLENCE	Consultorio odontología Servicio Extramural La Florida	1930	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
Lámpara cuello de cisne KRAMER N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Florida	1988	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)

Balanza electrónica HEALTH O METER 349KLX	Consultorio medicina Servicio Extramural La Florida	1715	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Tensiómetro de pared ALPK2 PARED	Consultorio medicina Servicio Extramural La Florida	1680	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Balanza electrónica HEALTH O METER 349KLX	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Florida	1724	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Tensiómetro de pared ALPK2 PARED	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Florida	1684	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Unidad odontológica RITTER EXCELLENCE	Consultorio odontología Servicio Extramural La Trinidad	3287	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
Lámpara cuello de cisne KRAMER N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Trinidad	2112	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)

Balanza electrónica pesabebés HEALTH O METER 522KL	Consultorio medicina Servicio Extramural La Trinidad	2084	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
Tensiómetro de pared ALPK2 PARED	Consultorio medicina Servicio Extramural La Trinidad	1676	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro de pared ALPK2 PARED	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Trinidad	1677	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Balanza electrónica HEALTH O METER 349KLX	Consultorio medicina Servicio Extramural La Trinidad	1719	Cuatrimstral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Balanza electrónica HEALTH O METER 349KLX	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Trinidad	1720	Cuatrimstral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Negatoscopio ARDENT N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural La Trinidad	7250	Cuatrimstral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.

Balanza electrónica HEALTH O METER 349KLX	Consultorio medicina Servicio Extramural San Lorenzo	1721	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Lámpara cuello de cisne KRAMER N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural San Lorenzo	1968	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
Unidad odontológica RITTER EXCELLENCE	Consultorio odontología Servicio Extramural San Lorenzo	3289	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

Balanza electrónica HEALTH O METER 349KLX	Consultorio enfermería Servicio Extramural San Lorenzo	1722	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Balanza electrónica pesabebés HEALTH O METER 522KL	Consultorio medicina Servicio Extramural San Lorenzo	2113	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
Tensiómetro de pared ALPK2 PARED	Consultorio medicina Servicio Extramural San Lorenzo	1685	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Tensiómetro de pared ALPK2 PARED	Consultorio enfermería Servicio Extramural San Lorenzo	1683	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Unidad odontológica RITTER EXCELLENCE	Consultorio odontología Servicio Extramural Santa Helena	2366	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de módulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifica el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
Tensiómetro de pared ALPK2 PARED	Consultorio medicina Servicio Extramural Santa Helena	1679	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Tensiómetro de pared ALPK2 PARED	Consultorio enfermería Servicio Extramural Santa Helena	1678	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Balanza electrónica HEALTH O METER 349KLX	Consultorio medicina Servicio Extramural Santa Helena	1718	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Balanza electrónica HEALTH O METER 349KLX	Consultorio enfermería Servicio Extramural Santa Helena	1717	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Lámpara cuello de cisne KRAMER N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural Santa Helena	2441	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
Balanza electrónica pesabebés HEALTH O METER 522KL	Consultorio medicina Servicio Extramural Santa Helena	686	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
Negatoscopio ARDENT N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Santa Helena	2689	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.

Unidad odontológica RITTER EXCELLENCE	Consultorio odontología Servicio Extramural Siratá	3285	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
Balanza electrónica HEALTH O METER 349KLX	Consultorio medicina Servicio Extramural Siratá	1716	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Tensiómetro de pared ALPK2 PARED	Consultorio medicina Servicio Extramural Siratá	1681	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Balanza SOHENLE ANALOGA	Consultorio enfermería Servicio Extramural Siratá	2289	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Negatoscopio ARDENT N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Siratá	1962	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
Nebulizador THOMAS 1125	Ambulancia sede Principal	2270	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Inspeccionar partes mecánicas. Inspeccionar sistema eléctrico y accesorios (cordón de alimentación, devanados del motor, etc.). Inspeccionar válvulas unidireccionales. Limpiar cámaras y verificar su sello. Revisar filtro bacteriológico y filtro silenciador, cambiar si es necesario. Inspeccionar fugas en el sistema de vacío (mangueras, empaques de hule y acoples). Verificar flujo máximo [lts./min]. Verificar rango de vacío [seg./mm. Hg]. Verificar el funcionamiento del equipo.

Tensiómetro WELCH ALLYN SHOCK RESISTANT	Ambulancia sede Principal	106	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro pediátrico ALP K2 ANEROIDES	Ambulancia sede Principal	No registra	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Succionador de secreciones SILFAB N8V	Ambulancia sede Principal	61	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Inspeccionar partes mecánicas (Rodamientos, sellos, fuelle, viela, anillos). Inspeccionar sistema eléctrico y accesorios (cordón de alimentación, devanados del motor, carbones, etc.). Inspeccionar válvulas unidireccionales. Limpiar cámaras y verificar su sello. Revisar filtro bacteriológico y filtro silenciador, cambiar si es necesario. Revisar sellado de nivel de líquido. Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario. Inspeccionar fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de hule y acoples). Verificar flujo máximo [lts./min]. Verificar rango de vacío [seg./mm. Hg]. Verificar el funcionamiento del equipo.

Oxímetro De Pulso RIESTER RIFOX	Ambulancia sede Principal	429	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Calibración anual, variable spo2, normatividad vigente.
Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Ambulancia sede Principal	6833	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Monitor de signos vitales EDAN M50	Ambulancia sede Principal	3045	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar el equipo en forma externa. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de Alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.). Verificar el funcionamiento de selección de parámetros de NIBP, SPO2, TEM, ECG, Con paciente o simulador verifique cada uno de los parámetros antes mencionados para garantizar que los está detectando y registrando adecuadamente. Para esto compruebe los parámetros seleccionados con los valores registrados. Verificar el funcionamiento del sensor y pinza spO2. Compruebe el funcionamiento de cada uno de los botones, selectores e indicadores, según sea el caso. Verificar la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo. Realizar los test de comprobación de parámetros desde el menú de servicio si es el caso. Verificar con varias mediciones la calibración del NIBP. verificar estado y carga de batería. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Fonendoscopio N.R.	Ambulancia sede Principal	No registra	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopio pediátrico N.R.	Ambulancia sede Principal	No registra	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Termo-higrómetro ALLA FRANCE	Ambulancia sede Principal	107	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.

Unidad odontológica RITTER EXCELLENCE	Unidad móvil 1 sede Principal	2077	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
Unidad odontológica portátil KROMADENT MP150	Unidad móvil 1 sede Principal	2970	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Ajustes mecánicos del equipo, revisión del estado de la lámpara cambiar si es necesario, revisión de mangueras de aire y agua, cambiar si es necesario, verificación de llaves y válvulas del equipo.
Lámpara cuello de cisne KRAMER N.R.	Unidad móvil 1 sede Principal	1963	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)

Balanza SOEHNLE ESTANDAR	Unidad móvil 1 sede Principal	2495	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Balanza electrónica pesabebés HEALTH O METER 522KL	Consultorio medicina Servicio Extramural La Florida	1587	Cuatrimestral	01 al 05	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
Tensiómetro WELCH ALLYN ML 182	Unidad móvil 1 sede Principal	221	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Unidad móvil 1 sede Principal	212	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Fonendoscopio N.R.	Unidad móvil 1 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopio pediátrico WELCH ALLYN	Unidad móvil 1 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

Termo-higrómetro BIO EMP JB913R	Unidad móvil 1 sede Principal	433	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.
Tensiómetro LORD ADULT	Unidad móvil 2 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro pediátrico LORD CHILD SIZE	Unidad móvil 2 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Tensiómetro de pared ALPK2 PARED	Unidad móvil 2 sede Principal	2885	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Unidad móvil 2 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Unidad odontológica ARDENT	Unidad móvil 2 sede Principal	2894	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

Amalgamador MILLENIUM 2000	Unidad móvil 2 sede Principal	2891	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
Lámpara de fotocurado DENTSPLY 506	Unidad móvil 2 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watimetro o con el Luxometro.
Lámpara de fotocurado DENTSPLY 506	Unidad móvil 2 sede Principal	577	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watimetro o con el Luxometro.

Fonendoscopio LORD	Unidad móvil 2 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopio N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopio pediátrico LORD	Unidad móvil 2 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

Lámpara cuello de cisne KRAMER N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	2888	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
Balanza TEZZIO PISO	Unidad móvil 2 sede Principal	2887	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Pieza de mano de alta NSK PANAIR	Unidad móvil 2 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.

Pieza de mano de baja NSK EX-203C	Unidad móvil 2 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
Negatoscopio ARDENT N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	2886	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
Negatoscopio ARDENT N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	2893	Cuatrimestral	04 al 08	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.

Termo-higrómetro HYGRO THEMOMETER HR 195	Unidad móvil 2 sede Principal	1613	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.
Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Consultorio de medicina 1 sede Principal	330	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 ADULT PARED	Consultorio de medicina 1 sede Principal	2	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Consultorio de medicina 1 sede Principal	3	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Fonendoscopio LITTMANN	Consultorio de medicina 1 sede Principal	331	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Consultorio de medicina 2 sede Principal	197	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Tensiómetro ALPK2 500w2	Consultorio de medicina 2 sede Principal	28	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Consultorio de medicina 2 sede Principal	30	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Tensiómetro WELCH ALLYN ML 182	Consultorio de medicina 2 sede Principal	29	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Fonendoscopio N.R.	Consultorio de medicina 2 sede Principal	198	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Consultorio de medicina 3 sede Principal	256	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Consultorio de medicina 3 sede Principal	58	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Tensiómetro ALPK2 500w2	Consultorio de medicina 3 sede Principal	57	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 500w2	Consultorio de medicina 3 sede Principal	258	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Fonendoscopio LITTMANN	Consultorio de medicina 3 sede Principal	257	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Consultorio de medicina 4 sede Principal	340	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 500w2	Consultorio de medicina 4 sede Principal	81	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Consultorio de medicina 4 sede Principal	82	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Fonendoscopio LITTMANN	Consultorio de medicina 4 sede Principal	340	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Consultorio de medicina 5 sede Principal	344	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 500w2	Consultorio de medicina 5 sede Principal	106	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Consultorio de medicina 5 sede Principal	107	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Tensiómetro WELCH ALLYN ML 182	Consultorio de medicina 5 sede Principal	346	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Balanza electrónica pesabebés HEALTH O METER 522KL	Consultorio de medicina 5 sede Principal	417	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

Fonendoscopio LITTMANN	Consultorio de medicina 5 sede Principal	345	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Consultorio de medicina 6 sede Principal	350	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 500w2	Consultorio de medicina 6 sede Principal	132	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Consultorio de medicina 6 sede Principal	133	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Fonendoscopio LITTMANN	Consultorio de medicina 6 sede Principal	351	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Consultorio de medicina 7 sede Principal	251	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Consultorio de medicina 7 sede Principal	162	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Tensiómetro ALPK2 500w2	Consultorio de medicina 7 sede Principal	161	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Fonendoscopio LITTMANN	Consultorio de medicina 7 sede Principal	252	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Consultorio de medicina 8 sede Principal	246	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Consultorio de medicina 8 sede Principal	1723	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Tensiómetro ALPK2 ADULT PARED	Consultorio de medicina 8 sede Principal	177	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Fonendoscopio LITTMANN	Consultorio de medicina 8 sede Principal	247	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Consultorio de medicina 9 sede Principal	353	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Balanza electrónica pesabebés HEALTH O METER 522KL	Consultorio de medicina 9 sede Principal	211	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Consultorio de medicina 9 sede Principal	203	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Tensiómetro ALPK2 500w2	Consultorio de medicina 9 sede Principal	202	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro pediátrico ALPK2 CHILD SIZE	Consultorio de medicina 9 sede Principal	355	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Fonendoscopio LITTMANN	Consultorio de medicina 9 sede Principal	354	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Consultorio de medicina 10 sede Principal	464	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Consultorio de medicina 10 sede Principal	415	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Tensiómetro ALP K2 500w2	Consultorio de medicina 10 sede Principal	414	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Fonendoscopio LITTMANN	Consultorio de medicina 10 sede Principal	465	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Consultorio de medicina 11 sede Principal	690	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Consultorio de medicina 11 sede Principal	3571	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Tensiómetro ALPK2 500w2	Consultorio de medicina 11 sede Principal	1686	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Fonendoscopio LITTMANN	Consultorio de medicina 11 sede Principal	840	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Consultorio de medicina gestantes sede Principal	567	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro WELCH ALLYN ML 182	Consultorio de medicina gestantes sede Principal	569	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Doppler fetal HUNTLEIGH FD1+	Consultorio de medicina gestantes sede Principal	488	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo.

Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Consultorio de medicina gestantes sede Principal	484	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Fonendoscopio LITTMANN	Consultorio de medicina gestantes sede Principal	568	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Balanza electrónica pesabebés HEALTH O METER 522KL	Sala de lactancia sede Principal	2033	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Consultorio de enfermería 1 sede Principal	759	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Lámpara cuello de cisne KRAMER N.R.	Consultorio de enfermería 1 sede Principal	1675	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
Tensiómetro WELCH ALLYN ML 182	Consultorio de enfermería 1 sede Principal	563	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Fonendoscopio LITTMANN	Consultorio de enfermería 1 sede Principal	556	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Tensiómetro WELCH ALLYN SHOCK RESISTANT	Consultorio de enfermería 2 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Balanza digital SECA 813	Consultorio de enfermería 2 sede Principal	3539	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Fonendoscopio WELCH ALLYN	Consultorio de enfermería 2 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Tensiómetro ALPK2 500w2	Consultorio de enfermería 3 sede Principal	438	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazalete, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro pediátrico ALPK2 CHILD SIZE	Consultorio de enfermería 3 sede Principal	6862	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazalete, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Balanza electrónica pesabebés HEALTH O METER 522KL	Consultorio de enfermería 3 sede Principal	440	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Consultorio de enfermería 3 sede Principal	4476	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Consultorio de enfermería 3 sede Principal	439	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Fonendoscopio LITTMANN	Consultorio de enfermería 3 sede Principal	4478	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Sala de estimulación sede Principal	239	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Oxímetro De Pulso EDAN H100B	Sala ERA 2 sede Principal	2724	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Calibración anual, variable spo2, normatividad vigente.

Tensiómetro pediátrico WELCH ALLYN 0297	Sala ERA 2 sede Principal	4575	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Fonendoscopio pediátrico WELCH ALLYN	Sala ERA 2 sede Principal	6512	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Lámpara de fotocurado DENTAMERICA LITEX 680	Consultorio de odontología 1 sede Principal	713	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watímetro o con el Luxómetro.

Unidad odontológica RITTER EXCELLENCE	Consultorio de odontología 1 sede Principal	710	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Consultorio de odontología 1 sede Principal	709	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Amalgamador DENTSPLY PROMIX400	Consultorio de odontología 1 sede Principal	1442	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.

Cavitron DENTSPLY GEN 130 PRO	Consultorio de odontología 1 sede Principal	674	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar cable de alimentación eléctrica. Revisar el conector del pedal. Verificar solenoide y válvula de aguja. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta. Revisar la punta. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
Pieza de mano de baja NSK EX-203C	Consultorio de odontología 1 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario. Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
Pieza de mano de alta NSK PANAIR	Consultorio de odontología 1 sede Principal	1098	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.

Termo-higrómetro HYGROMETER HR 195	Consultorio de odontología 1 sede Principal	1605	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.
Amalgamador DENTSPLY PROMIX400	Consultorio de odontología 2 sede Principal	695	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
Unidad odontológica RITTER EXCELLENCE	Consultorio de odontología 2 sede Principal	691	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

Lámpara de fotocurado DENTSPLY 506	Consultorio de odontología 2 sede Principal	1449	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watimetro o con el Luxometro.
Pieza de mano de baja NSK EX-203C	Consultorio de odontología 2 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra angulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
Pieza de mano de alta NSK PANAIR	Consultorio de odontología 2 sede Principal	4501	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.

Termo-higrómetro HYGROMETER HR 195	Consultorio de odontología 2 sede Principal	1606	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.
Lámpara de fotocurado DENTSPLY 506	Consultorio de odontología 3 sede Principal	592	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watimetro o con el Luxometro.
Unidad odontológica RITTER EXCELLENCE	Consultorio de odontología 3 sede Principal	669	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

Pieza de mano de baja NSK EX-203C	Consultorio de odontología 3 sede Principal	444	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
Pieza de mano de alta NSK PANAIR	Consultorio de odontología 3 sede Principal	4499	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
Termo-higrómetro HYGROMETER HR 195	Consultorio de odontología 3 sede Principal	1607	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.

Unidad odontológica RITTER EXCELLENCE	Consultorio de odontología 4 sede Principal	653	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Consultorio de odontología 4 sede Principal	656	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Lámpara de fotocurado DENTSPLY 506	Consultorio de odontología 4 sede Principal	1448	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watímetro o con el Luxómetro.

Pieza de mano de baja NSK EX-203C	Consultorio de odontología 4 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
Pieza de mano de alta NSK PANAIR	Consultorio de odontología 4 sede Principal	4497	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
Termo-higrómetro HYGROMETER HR 195	Consultorio de odontología 4 sede Principal	1608	Cuatrimestral	14 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.

Lámpara de fotocurado DENTAMERICA LITEX 695	Consultorio de odontología 5 sede Principal	641	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watimetro o con el Luxometro.
Unidad odontológica RITTER EXCELLENCE	Consultorio de odontología 5 sede Principal	637	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
Amalgamador DENTSPLY PROMIX400	Consultorio de odontología 5 sede Principal	1443	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.

Pieza de mano de baja NSK EX-203C	Consultorio de odontología 5 sede Principal	449	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
Pieza de mano de alta NSK PANAIR	Consultorio de odontología 5 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
Termo-higrómetro N.R.	Consultorio de odontología 5 sede Principal	432	Cuatrimestral	14 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.

Lámpara de fotocurado DENTSPLY 506	Consultorio de odontología 6 sede Principal	1450	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watímetro o con el Luxómetro.
Unidad odontológica RITTER EXCELLENCE	Consultorio de odontología 6 sede Principal	590	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
Amalgamador DENTSPLY PROMIX400	Consultorio de odontología 6 sede Principal	593	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.

Pieza de mano de baja NSK EX-203C	Consultorio de odontología 6 sede Principal	4482	Cuatrimstral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra angulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
Pieza de mano de alta NSK PANAIR	Consultorio de odontología 6 sede Principal	6198	Cuatrimstral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
Termo-higrómetro ALLEN FRANCE	Consultorio de odontología 6 sede Principal	1609	Cuatrimstral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.

Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Consultorio de odontología 7 sede Principal	589	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Lámpara de fotocurado DENTAMERICA LITEX 680	Consultorio de odontología 7 sede Principal	613	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watímetro o con el Luxómetro.
Unidad odontológica RITTER EXCELLENCE	Consultorio de odontología 7 sede Principal	573	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

Pieza de mano de baja NSK EX-203C	Consultorio de odontología 7 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
Pieza de mano de alta NSK PANAIR	Consultorio de odontología 7 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
Termo-higrómetro HYGROMETER HR 195	Consultorio de odontología 7 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.

Lámpara de fotocurado DENTSPLY 506	Consultorio de odontología pyp sede Principal	1454	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watímetro o con el Luxómetro.
Cavitron DENTSPLY GEN 130 PRO	Consultorio de odontología pyp sede Principal	625	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar cable de alimentación eléctrica. Revisar el conector del pedal. Verificar solenoide y válvula de aguja. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta. Revisar la punta. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
Cavitron DENTSPLY GEN 130 PRO	Consultorio de odontología pyp sede Principal	595	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar cable de alimentación eléctrica. Revisar el conector del pedal. Verificar solenoide y válvula de aguja. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta. Revisar la punta. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

Unidad odontológica RITTER EXCELLENCE	Consultorio de odontología pyp sede Principal	622	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
Unidad odontológica RITTER EXCELLENCE	Consultorio de odontología pyp sede Principal	611	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
Balanza electrónica HEALTH O METER 349KL	Consultorio de odontología pyp sede Principal	624	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Pieza de mano de baja NSK EX-203C	Consultorio de odontología pyp sede Principal	1621	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
Pieza de mano de alta NSK PANAIR	Consultorio de odontología pyp sede Principal	1179	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
Pieza de mano de baja NSK EX-203C	Consultorio de odontología pyp sede Principal	1622	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.

Pieza de mano de baja NSK EX-203C	Consultorio de odontología pyp sede Principal	4483	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
Termo-higrómetro HYGROMETER HR 195	Consultorio de odontología pyp sede Principal	No registra	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.
Equipo de rayos X odontológico FIAD FIRENCE BNB	Sala de rayos X odontológico sede Principal	3632	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar conector de tubo de rayos X. Verificar estado de cable de alimentación eléctrica, fusible y demás componentes eléctricos y electrónicos. Verificar estado de perillas, y lámpara indicadora. Lubricar articulación de brazo portatubo, si es necesario. Verificar funcionamiento del compensador de voltaje de línea. Verificar corrientes del tubo y tiempo de exposición. Verificar funcionamiento con el operador del equipo

Sensor radiográfico digital N.R.	Sala de rayos X odontológico sede Principal	No registra	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza del equipo, pruebas de funcionamiento del sistema.
Negatoscopio ARDENT N.R.	Sala de rayos X odontológico sede Principal	1916	Cuatrimestral	14 al 18	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Consultorio de medicina 1 centro amigable sede Principal	359	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Tensiómetro WELCH ALLYN ML 182	Consultorio de medicina 1 centro amigable sede Principal	361	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Doppler fetal HUNTLEIGH FD1+	Consultorio de medicina 1 centro amigable sede Principal	1231	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo.
Balanza electrónica HEALTH O METER 500KL	Consultorio de medicina 1 centro amigable sede Principal	1235	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Tensiómetro ALPK2 500w2	Consultorio de medicina 1 centro amigable sede Principal	1233	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Fonendoscopio LITTMANN	Consultorio de medicina 1 centro amigable sede Principal	360	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	367	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Tensiómetro ALP K2 500w2	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	1190	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Doppler fetal HUNTLEIGH FD1+	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	1188	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo.
Balanza electrónica HEALTH O METER 500KL	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	1191	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Tensiómetro WELCH ALLYN ML 182	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	369	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro pediátrico ALP K2 CHILD SIZE	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	370	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Fonendoscopio LITTMANN	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	4444	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

Amalgamador GNATUS MIX II	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	1209	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
Unidad odontológica RITTER EXCELLENCE	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	1206	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
Balanza electrónica HEALTH O METER 500KL	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	1219	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Cavitron DENTSPLY GEN 130 PRO	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	1211	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar cable de alimentación eléctrica. Revisar el conector del pedal. Verificar solenoide y válvula de aguja. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta. Revisar la punta. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
Pieza de mano de alta NSK PANAIR	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	4936	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
Pieza de mano de baja NSK EX-203C	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	No registra	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra angulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.

Lámpara de fotocurado DENTAMERICA LITEX 680	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	1210	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watímetro o con el Luxómetro.
Termo-higrómetro HYGROMETER HR 195	Consultorio de odontología Centro Amigable sede Principal	No registra	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.
Tensiómetro WELCH ALLYN ML 182	Consultorio de enfermería centro amigable sede Principal	6870	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Balanza electrónica HEALTH O METER 500KL	Consultorio de enfermería centro amigable sede Principal	1271	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Lámpara cuello de cisne KRAMER N.R.	Consultorio de enfermería centro amigable sede Principal	2205	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
Fonendoscopio LITTMANN	Consultorio de enfermería centro amigable sede Principal	6500	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

Balanza electrónica HEALTH O METER 500KL	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	1391	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Balanza electrónica pesabebés HEALTH O METER 522KL	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	1390	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	375	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Oxímetro De Pulso HUNTLEIGH SMATRSIGNS	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	1386	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Calibración anual, variable spo2, normatividad vigente.
Doppler fetal HUNTLEIGH FD1+	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	1385	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo.
Tensiómetro TYCOS ADULT	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	7190	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Tensiómetro pediátrico ALP-K2 500-C	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	379	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Fonendoscopio LITTMANN	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	839	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Balanza electrónica HEALTH O METER 500KL	Consultorio de medicina prioritaria 2 sede Principal	1309	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Consultorio de medicina prioritaria 2 sede Principal	385	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 500w2	Consultorio de medicina prioritaria 2 sede Principal	1307	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Fonendoscopio LITTMANN	Consultorio de medicina prioritaria 2 sede Principal	377	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

Tensiómetro ALP K2 500w2	Sala de procedimientos menores sede Principal	1349	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 500w2	Sala de procedimientos menores sede Principal	1364	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro TYCOS CHILD SIZE	Sala de procedimientos menores sede Principal	1360	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Lámpara cuello de cisne KRAMER N.R.	Sala de procedimientos menores sede Principal	1967	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
Fonendoscopio LITTMANN	Sala de procedimientos menores sede Principal	670	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Termo-higrómetro HYGRO THEMOMETER HR 195	Sala de procedimientos menores sede Principal	1611	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.

Oxímetro De Pulso EDAN H100B	Sala ERA 1 sede Principal	2859	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Calibración anual, variable spo2, normatividad vigente.
Tensiómetro WELCH ALLYN SHOCK RESISTANT	Sala ERA 1 sede Principal	696	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro pediátrico WELCH ALLYN N.R.	Sala ERA 1 sede Principal	697	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Fonendoscopio WELCH ALLYN	Sala ERA 1 sede Principal	693	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Tensiómetro WELCH ALLYN ML 182	Sala de rehidratación oral sede Principal	378	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Balanza HEALTH O METER 142KL	Sala de rehidratación oral sede Principal	2969	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Electrocardiógrafo EDAN SE 601C	Sala de rehidratación oral sede Principal	3600	Cuatrimestral	19 al 23	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verificar tensión de entrada o voltaje de baterías. Revisión de estabilidad del soporte del equipo. Revisión del correcto funcionamiento panel frontal y teclas de mando. Verificación funcionamiento de electrodos, cables y fusibles. Revisión y limpieza de tarjeta electrónica. Verificación de respuesta, calidad de trazo, impresión y transporte del papel. Limpieza general.
Baño serológico MEMMERT WNB7	Laboratorio clínico sede Principal	1055	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar equipos y accesorios metálicos o sintéticos (tapadera, sellos o empaques, aisladores térmicos). Revisar conexiones eléctricas y accesorios (conductores y enchufes). Verificar control automático de temperatura. Limpie los contactos electrónicos si es el caso. Asegúrese de la buena conducción eléctrica en el sistema de potencia. Inspeccionar lámparas de señalización. Comprobar tiempo de alcance de temperatura. Verificar el funcionamiento del equipo.
Baño serológico MEMMERT W200	Laboratorio clínico sede Principal	1053	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar equipos y accesorios metálicos o sintéticos (tapadera, sellos o empaques, aisladores térmicos). Revisar conexiones eléctricas y accesorios (conductores y enchufes). Verificar control automático de temperatura. Limpie los contactos electrónicos si es el caso. Asegúrese de la buena conducción eléctrica en el sistema de potencia. Inspeccionar lámparas de señalización. Comprobar tiempo de alcance de temperatura. Verificar el funcionamiento del equipo.

Micropipeta BRAND TRANSFERPETTE	Laboratorio clínico sede Principal	46	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador
Micropipeta BRAND TRANSFERPETTE	Laboratorio clínico sede Principal	39	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador
Micropipeta BRAND TRANSFERPETTE	Laboratorio clínico sede Principal	35	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador

Micropipeta HUMAN HUMANPETTE	Laboratorio clínico sede Principal	38	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta. Efectuar lubricación de vástago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador
Contador de células KRAMER IMPO01	Laboratorio clínico sede Principal	1043	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas, ajuste de conectores si se requiere, pruebas de funcionamiento del equipo, limpieza general.
Microscopio OLYMPUS CH	Laboratorio clínico sede Principal	1067	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa. Limpiar Cto optico (oculares, objetivos, condensador, filtros). Efectuar inspección externa del equipo (tornillos, macrométricos, micrométricos, desplazamiento de porta laminas, aspecto físico en general). Efectuar limpieza integral interna (excepto sistema óptico). Revisar sistema eléctrico (transformador, conductores, conectores) cambiar elementos con signos de deterioro. Comprobar apertura del diafragma, iris y montaje del condensador, ajustar y lubricar si es necesario. Verificar los desplazamientos mecánicos para movimientos suaves, enfoque, platina porta objetos. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador. Enfocar lámina y observar en 4x, 10x, 40x y 100x con aceite de inmersión.

Analizador automático de hematología WIENER COUNTER 19	Laboratorio clínico sede Principal	1041	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de tarjetas electrónicas, ventiladores, Revisión del sistema eléctrico Ajuste si es necesario conectores. Verificación del funcionamiento del sistema, filtros. Realización de todos los ítems que se presentan en el menú de mantenimiento del equipo Limpieza general pruebas de funcionamiento.
Agitador hematológico basculante INDULAB 2007	Laboratorio clínico sede Principal	1042	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de motor, sistema eléctrico, ajuste o lubrique si es necesario, revisión de control de velocidad ajustar si es necesario. Pruebas de funcionamiento del equipo, limpieza general. Calibración anual, variable rpm, normatividad vigente.
Micropipeta HUMAN HUMANPETTE	Laboratorio clínico sede Principal	40	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador

Micropipeta HUMAN HUMANPETTE	Laboratorio clínico sede Principal	36	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta. Efectuar lubricación de vástago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador
Destilador de agua TUTTNAWER 9000	Laboratorio clínico sede Principal	1072	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Realizar limpieza de la caldera. Verificar que la caldera no contenga depósitos excesivos, si es así, utilizar un limpiador apropiado para limpiar dichos depósitos. Limpiar la botella de colector/dispensador. Reemplazar el filtro de carbono. Verificar el estado físico del destilador reportando si este presenta algún daño. Realizar limpieza de la estructura del destilador. Realizar pruebas de funcionamiento con el operario
Microscopio OLYMPUS CH	Laboratorio clínico sede Principal	1069	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa. Limpiar Cto optico (oculares, objetivos, condensador, filtros). Efectuar inspección externa del equipo (tornillos, macrométricos, micrométricos, desplazamiento de porta laminas, aspecto físico en general). Efectuar limpieza integral interna (excepto sistema óptico). Revisar sistema eléctrico (transformador, conductores, conectores) cambiar elementos con signos de deterioro. Comprobar apertura del diafragma, iris y montaje del condensador, ajustar y lubricar si es necesario. Verificar los desplazamientos mecánicos para movimientos suaves, enfoque, platina porta objetos. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador. Enfocar lámina y observar en 4x, 10x, 40x y 100x con aceite de inmersión.

Destilador de agua TUTTNAWER 9000	Laboratorio clínico sede Principal	1073	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Realizar limpieza de la caldera. Verificar que la caldera no contenga depósitos excesivos, si es así, utilizar un limpiador apropiado para limpiar dichos depósitos. Limpiar la botella de colector/dispensador. Reemplazar el filtro de carbono. Verificar el estado físico del destilador reportando si este presenta algún daño. Realizar limpieza de la estructura del destilador. Realizar pruebas de funcionamiento con el operario
Micropipeta HUMAN 19130L	Laboratorio clínico sede Principal	877	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador
Agitador de mazzini BOECO OS-20 8059001	Laboratorio clínico sede Principal	1066	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de motor, sistema eléctrico, ajuste o lubrique si es necesario, revisión de control de velocidad ajustar si es necesario. Pruebas de funcionamiento del equipo, limpieza general. Calibración anual, variable rpm, normatividad vigente.

Centrifuga CLAY ADAMS DYNAC III	Laboratorio clínico sede Principal	1063	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar conexiones eléctricas, internas y externas. Verificar perillas de control y señalizaciones. Revisar el motor y sus componentes (carbones, baleros, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario. Verificar el balance del plato con carga. Realizar calibración de tubos con una balanza y enfrentar sus pesos. Verificar medidor de tiempo. Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango (máximo 3,500 - 4,500 r.p.m.). Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo (inspección de ruidos o vibraciones inusuales).
Centrifuga hematocrito HETTICH HEMATOCRIT 210	Laboratorio clínico sede Principal	1061	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar conexiones eléctricas, internas y externas. Verificar perillas de control y señalizaciones. Revisar el motor y sus componentes (carbones, baleros, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario. Verificar el balance del plato con carga. Realizar calibración de tubos con una balanza y enfrentar sus pesos. Verificar medidor de tiempo. Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango (máximo 3,500 - 4,500 r.p.m.). Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo (inspección de ruidos o vibraciones inusuales).
Incubadora de cultivos BINDER BD53	Laboratorio clínico sede Principal	1038	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.). Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador, circuitos integrados, etc.). Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores. Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del equipo, según corresponda. Verificar protecciones y alarmas cuando corresponda (sobretemperatura, no circulación del aire, etc.). Medir voltaje de alimentación y corriente de consumo. Medir resistencia de carcasa a tierra (d 0.5). Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador.

Microscopio OPTIKA B352	Laboratorio clínico sede Principal	1039	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa. Limpiar Cto optico (oculares, objetivos, condensador, filtros). Efectuar inspección externa del equipo (tornillos, macrométricos, micrométricos, desplazamiento de porta laminas, aspecto físico en general). Efectuar limpieza integral interna (excepto sistema óptico). Revisar sistema eléctrico (transformador, conductores, conectores) cambiar elementos con signos de deterioro. Comprobar apertura del diafragma, iris y montaje del condensador, ajustar y lubricar si es necesario. Verificar los desplazamientos mecánicos para movimientos suaves, enfoque, platina porta objetos. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador. Enfocar lámina y observar en 4x, 10x, 40x y 100x con aceite de inmersión.
Cámara de flujo laminar ESCO AHC-4D2	Laboratorio clínico sede Principal	1040	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verificación y limpieza de circuitos eléctricos, cambio de filtro epa, revisión de motor, limpieza, pruebas de funcionamiento, limpieza general.
Micropipeta HUMAN 19120L	Laboratorio clínico sede Principal	876	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador

Centrifuga CLAY ADAMS DYNAC III	Laboratorio clínico sede Principal	3248	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar conexiones eléctricas, internas y externas. Verificar perillas de control y señalizaciones. Revisar el motor y sus componentes (carbones, baleros, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario. Verificar el balance del plato con carga. Realizar calibración de tubos con una balanza y enfrentar sus pesos. Verificar medidor de tiempo. Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango (máximo 3,500 - 4,500 r.p.m.). Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo (inspección de ruidos o vibraciones inusuales).
Glucómetro ONE CALL PLUS	Laboratorio clínico sede Principal	No registra	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza externa del equipo. Revisión de tarjeta electrónica y batería. Revisión de parámetros. Pruebas de funcionamiento y operatividad. Limpieza general
Termómetro digital de nevera BIOTEMP JUMBO DISPLAY JB913R	Laboratorio clínico sede Principal	434	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza integral. Inspección de condiciones ambientales. Revisión de control temperatura. Revisión de sensor de temperatura. Pruebas de funcionamiento.

Termómetro digital de nevera EBCHQ ETP-101	Laboratorio clínico sede Principal	1614	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza integral. Inspección de condiciones ambientales. Revisión de control temperatura. Revisión de sensor de temperatura. Pruebas de funcionamiento.
Termómetro digital de nevera ALLA FRANCE HR 195	Laboratorio clínico sede Principal	1615	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza integral. Inspección de condiciones ambientales. Revisión de control temperatura. Revisión de sensor de temperatura. Pruebas de funcionamiento.
Termómetro digital de nevera ALLA FRANCE 91000-009/A	Laboratorio clínico sede Principal	440	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza integral. Inspección de condiciones ambientales. Revisión de control temperatura. Revisión de sensor de temperatura. Pruebas de funcionamiento.

Termo-higrómetro N.R.	Archivo sede Principal	No registra	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.
Termo-higrómetro N.R.	Laboratorio clínico sede Principal	1614	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.
Termo-higrómetro N.R.	Laboratorio clínico sede Principal	434	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.

Termo-higrómetro N.R.	Laboratorio clínico sede Principal	No registra	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.
Incubadora indicador de biológicos EZ TEST 1401	Esterilización sede Principal	313	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.). Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador, circuitos integrados, etc.). Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores. Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del equipo, según corresponda. Verificar protecciones y alarmas cuando corresponda (sobretemperatura, no circulación del aire, etc.). Medir voltaje de alimentación y corriente de consumo. Medir resistencia de carcasa a tierra (d 0.5). Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador.
Incubadora 3M 390	Esterilización sede Principal	3208	Cuatrimestral	21 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.). Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador, circuitos integrados, etc.). Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores. Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del equipo, según corresponda. Verificar protecciones y alarmas cuando corresponda (sobretemperatura, no circulación del aire, etc.). Medir voltaje de alimentación y corriente de consumo. Medir resistencia de carcasa a tierra (d 0.5). Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador.

Termo-higrómetro ALLA FRANCE	Esterilización sede Principal	304	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.
Unidad odontológica portátil OD- PORTATIL OD-02	Oficina Mantenimiento sede Principal	2415	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Ajustes mecánicos del equipo, revisión del estado de la lámpara cambiar si es necesario, revisión de mangueras de aire y agua, cambiar si es necesario, verificación de llaves y válvulas del equipo.
Unidad odontológica portátil ZUB-IOLA N.R.	Oficina Mantenimiento sede Principal	1699	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Ajustes mecánicos del equipo, revisión del estado de la lámpara cambiar si es necesario, revisión de mangueras de aire y agua, cambiar si es necesario, verificación de llaves y válvulas del equipo.

Negatoscopio ARDENT N.R.	Oficina Mantenimiento sede Principal	1839	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
Amalgamador INDULAB PROMIX400	Desplazamientos Odontología sede Principal	2916	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
Lámpara de fotocurado DENTAMERICA LITEX 680	Desplazamientos Odontología sede Principal	2282	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watimetro o con el Luxometro.

Doppler fetal HUNTLEIGH FD1+	Desplazamientos Medicina sede Principal	1806	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo.
Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Desplazamientos Medicina sede Principal	689	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro pediátrico WELCH ALLYN SHOCK RESISTANT	Desplazamientos Medicina sede Principal	4573	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Tensiómetro WELCH ALLYN SHOCK RESISTANT	Desplazamientos Enfermería sede Principal	7195	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Oxímetro De Pulso KONICA MINOLTA PULSOX2	Desplazamientos Medicina sede Principal	4492	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Calibración anual, variable spo2, normatividad vigente.
Pieza de mano de alta NSK PANAIR	Desplazamientos Odontología sede Principal	No registra	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio de fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.

Pieza de mano de baja NSK EX-203C	Desplazamientos Odontología sede Principal	No registra	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra ángulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
Tensiómetro pediátrico WELCH ALLYN SHOCK RESISTANT	Desplazamientos Enfermería sede Principal	4574	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro WELCH ALLYN SHOCK RESISTANT	Desplazamientos Medicina sede Principal	7137	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Equipo de órganos de los sentidos WELCH ALLYN 19090	Desplazamientos Enfermería sede Principal	688	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Balanza HEALTH O METER 100KL	Desplazamientos Enfermería sede Principal	3507	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Fonendoscopio LITTMANN	Desplazamientos Enfermería sede Principal	841	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

Fonendoscopio LITTMANN	Desplazamientos Medicina sede Principal	No registra	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Glucómetro ONE CALL PLUS	Desplazamientos Medicina sede Principal	No registra	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Revisión y limpieza externa del equipo. Revisión de tarjeta electrónica y batería. Revisión de parámetros. Pruebas de funcionamiento y operatividad. Limpieza general
Termo-higrómetro ALLA FRANCE HR 195	Desplazamientos Medicina sede Principal	1616	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.

Tensiómetro ALPK2 1969	Salud Pública (PIC) sede Principal	T32	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 1969	Salud Pública (PIC) sede Principal	T31	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 1969	Salud Pública (PIC) sede Principal	T30	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Tensiómetro ALPK2 1969	Salud Pública (PIC) sede Principal	T29	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 1969	Salud Pública (PIC) sede Principal	T28	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 1969	Salud Pública (PIC) sede Principal	T27	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Tensiómetro ALPK2 1969	Salud Pública (PIC) sede Principal	T26	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, peras, válvulas, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 1969	Salud Pública (PIC) sede Principal	T25	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, peras, válvulas, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 1969	Salud Pública (PIC) sede Principal	T24	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, peras, válvulas, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Tensiómetro ALPK2 1969	Salud Pública (PIC) sede Principal	T23	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 1969	Salud Pública (PIC) sede Principal	T22	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 1969	Salud Pública (PIC) sede Principal	T21	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Tensiómetro ALPK2 1969	Salud Pública (PIC) sede Principal	T20	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 1969	Salud Pública (PIC) sede Principal	T19	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 1969	Salud Pública (PIC) sede Principal	T18	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Tensiómetro ALPK2 1969	Salud Pública (PIC) sede Principal	T17	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 1969	Salud Pública (PIC) sede Principal	T16	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
Tensiómetro ALPK2 1969	Salud Pública (PIC) sede Principal	7194	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo, el cual es satisfactorio. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

Balanza HEALTH O METER 100KL	Salud Pública (PIC) sede Principal	3509	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Balanza HEALTH O METER 100KL	Salud Pública (PIC) sede Principal	3510	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Balanza HEALTH O METER 100KL	Salud Pública (PIC) sede Principal	3511	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Balanza HEALTH O METER 100KL	Salud Pública (PIC) sede Principal	3512	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Balanza HEALTH O METER 100KL	Salud Pública (PIC) sede Principal	3517	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Balanza TANITA HA 520	Salud Pública (PIC) sede Principal	2736	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Balanza TANITA HA 520	Salud Pública (PIC) sede Principal	2737	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Balanza TANITA HA 520	Salud Pública (PIC) sede Principal	2739	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Balanza TANITA HA 520	Salud Pública (PIC) sede Principal	2740	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Balanza TANITA HA 520	Salud Pública (PIC) sede Principal	2490	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Balanza TANITA HA 520	Salud Pública (PIC) sede Principal	2730	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Balanza TANITA HA 520	Salud Pública (PIC) sede Principal	2729	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Balanza TANITA HA-520	Salud Pública (PIC) sede Principal	2728	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
Balanza TANITA HA-520	Salud Pública (PIC) sede Principal	2726	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.
BalanzaTANITA HA-520	Salud Pública (PIC) sede Principal	2734	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (tallímetro, pesas, plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	640	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	639	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	638	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	637	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	636	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	635	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	634	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	633	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	632	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	631	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	630	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	629	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	628	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	627	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	626	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	625	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	624	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	623	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	622	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	621	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	620	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	619	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	618	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Fonendoscopia ALPK2	Salud Pública (PIC) sede Principal	617	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

Termómetro de máximas y mínimas ALLA FRANCE CADENA DE FRIÓ	Cadena de frio (PAI) Sede Principal	1604	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza integral. Inspección de condiciones ambientales. Revisión de control temperatura. Revisión de sensor de temperatura. Pruebas de funcionamiento.
Termómetro digital de nevera ALLA FRANCE FRIDGE / FREEZER FT-91000-009-A_ES	Cadena de frio (PAI) Sede Principal	437	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza integral. Inspección de condiciones ambientales. Revisión de control temperatura. Revisión de sensor de temperatura. Pruebas de funcionamiento.
Termómetro digital de nevera ALLA FRANCE FRIDGE / FREEZER FT-91000-009-A_ES	Cadena de frio (PAI) Sede Principal	435	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza integral. Inspección de condiciones ambientales. Revisión de control temperatura. Revisión de sensor de temperatura. Pruebas de funcionamiento.

Termómetro de máximas y mínimas ALLA FRANCE CADENA DE FRIO	Vacunación sede Principal	1059	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza integral. Inspección de condiciones ambientales. Revisión de control temperatura. Revisión de sensor de temperatura. Pruebas de funcionamiento.
Termómetro digital de nevera	Farmacia sede Principal	No registra	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza integral. Inspección de condiciones ambientales. Revisión de control temperatura. Revisión de sensor de temperatura. Pruebas de funcionamiento.
Termo-higrómetro ALLA FRANCE	Farmacia sede Principal	3478	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.

Termo-higrómetro ALLA FRANCE	Farmacia sede Principal	3479	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.
Termo-higrómetro BIO TEMP JB913R	Farmacia sede Principal	No registra	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.
Termo-higrómetro BIO TEMP JB913R	Farmacia sede Principal	No registra	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.

Termo-higrómetro ALLA FRANCE	Bodega almacén sede Principal	6889	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.
Termo-higrómetro BIO TEMP JUMBO DISPLAY JB913R	Deposito material médico sede Principal	431	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.
Termo-higrómetro BIO TEMP JUMBO DISPLAY JB913R	Recepción Centro amigable sede Principal	3479	Cuatrimestral	24 al 28	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Revisión de batería. Revisión de display. Ajuste de contactos. Verificar funcionamiento del equipo con el operador.

Tensiometro Pediátrico ALP-K2 500-C	Consultorio de medicina 10 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar la condición física del equipo en general. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Inspeccione: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Verifique que no hallan fugas en todos los componentes del equipo. Verifique la medida del manómetro con patrón certificado. Verificar funcionamiento del equipo.
Fonendoscopio pediátrico LORD	Consultorio de medicina 5 sede Principal	No registra	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
Infantómetro SECA 417	Consultorio de medicina 5 sede Principal	3681	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Limpieza integral externa del equipo, incluyendo el quite del tope para los pies para eliminar cualquier suciedad en los rieles de guía. Revisar el estado del mecanismo de plegado del equipo. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Verificar que los topes de la cabeza y los pies se encuentren en buen estado. Revisar que el riel de la guía de tope de los pies, sube y baja con precisión y suavidad.

Tallímetro SECA 213	Consultorio de medicina 1 sede Principal	3674	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
Tallímetro SECA 213	Consultorio de medicina 3 sede Principal	3675	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
Tallímetro SECA 213	Consultorio de medicina 6 sede Principal	3676	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.

Tallímetro SECA 213	Consultorio de medicina 8 sede Principal	3677	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
Tallímetro SECA 213	Consultorio de medicina 11 sede Principal	3678	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
Tallímetro SECA 213	Consultorio de medicina gestantes sede Principal	3680	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.

Tallímetro SECA 213	Consultorio PyP Enfermería 4	3679	Cuatrimestral	09 al 13	03 07 11	2020	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslicen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
---------------------	---------------------------------	------	---------------	----------	----------------	------	--------------------------	--

DIRECTOR/GERENTE

JEFE DE MANTENIMIENTO