

PLAN DE MANTENIMIENTO A EQUIPO BIOMEDICO

SN3000-PMH

Nombre de la institución: E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

Dirección: Calle 28 # 15-120

Municipio: DUITAMA

Fecha de Elaboración: Enero 2021

Vigencia: 2021

Recursos asignados para el mantenimiento a equipo biomedico: \$ 80.000.000

Nombre del equipo	Localización	N° de inventario	Periodicidad	Fecha			Responsables	Actividades
				DD	MM	AA		
AGITADOR DE MAZZINI Marca: BOECO Modelo: 05-20 Serie: 8059001 / 010108-1001-0032	Laboratorio Clínico -Toma de Muestras	1066	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de motor, sistema eléctrico, ajuste o lubrique si es necesario, revisión de control de velocidad ajustar si es necesario. Pruebas de funcionamiento del equipo, limpieza general. Calibración anual, variable rpm, normatividad vigente. Fecha de calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
AGITADOR HEMATOLOGICO VASCULANTE Marca: INDULAB Modelo: 2007 Serie: A-2007	Laboratorio Clínico -Toma de Muestras	1042	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de motor, sistema eléctrico, ajuste o lubrique si es necesario, revisión de control de velocidad ajustar si es necesario. Pruebas de funcionamiento del equipo, limpieza general. Calibración anual, variable rpm, normatividad vigente. Fecha de calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
AMALGAMADOR Marca: DENTSPLY Modelo: PROMIX400 Serie: 33479	Consultorio Odontología 5	1443	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR Marca: DENTSPLY Modelo: PROMIX400 Serie: 33278	Consultorio Odontología 2	695	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR Marca: DENTSPLY Modelo: PROMIX400 Serie: 33284	Consultorio Odontología 1	1442	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.

AMALGAMADOR Marca: DENTSPLY Modelo: PROMIX400 Serie: 36005	Desplazamiento Odontología	2916	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR Marca: DENTSPLY Modelo: PROMIX401 Serie: 33476	Consultorio Odontología 6	593	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR Marca: MILLENIUM Modelo: 2000 Serie: AAA1188	Unidad móvil 2	2891	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
AMALGAMADOR Marca: GNATUS Modelo: MIX II Serie: 44664420024	Consultorio Odontología Centro Amigable	1209	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar cable de alimentación. Desarme y limpie el sistema de dispensador para mercurio y limadura de plata. Si es el caso, Verificar perillas o botones de control, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores. Si es el caso, Lubricar partes móviles del motor. Siempre y cuando el fabricante lo sugiera. Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados. Limpie los contactos electrónicos de tarjetas o circuitos de control. Limpie los contactos o conectores que manejen la potencia y asegúrese que están en buen estado.
BALANZA DIGITAL Marca: SECA Modelo: 813 Serie: 8813093171673	Consultorio enfermería 2	3539	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015615	Consultorio de medicina 1 sede Principal	3	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015688	Consultorio de medicina 2 sede Principal	30	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015687	Consultorio de medicina 3 sede Principal	58	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015677	Consultorio de medicina 4 sede Principal	82	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015678	Consultorio de medicina 5 sede Principal	107	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015676	Consultorio de medicina 6 sede Principal	133	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015626	Consultorio de medicina 7 sede Principal	162	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015672	Consultorio de medicina 8 sede Principal	1723	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015684	Consultorio de medicina 9 sede Principal	203	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015696	Consultorio de medicina 10 sede Principal	415	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 8440071757	Consultorio de medicina 11 sede Principal	3571	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 500KL Serie: 500000795	Consultorio de medicina gestantes sede Principal	484	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 500KL Serie: 5000001455	Consultorio de enfermería 1 sede Principal	759	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 349KLX Serie: 3500015625	Consultorio de enfermería 3 sede Principal	439	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo:500KL Serie: 5990003230	Sala de estimulación sede Principal	239	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 500KL Serie: 50000205277	Consultorio de odontología 1 sede Principal	709	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 500KL Serie: 5000021277	Consultorio de odontología 4 sede Principal	656	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 500KL Serie: 5000001463	Consultorio de odontología 7 sede Principal	589	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 500KL Serie: 5990003231	Consultorio de odontología pyp sede Principal	624	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015683	Consultorio medicina Servicio Extramural Avenidaños 1	178	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015600	Consultorio medicina Servicio Extramural La Florida	1715	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015671	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Florida	1724	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015673	Consultorio medicina Servicio Extramural La Trinidad	1719	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015674	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Trinidad	1720	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015652	Consultorio medicina Servicio Extramural San Lorenzo	1721	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015651	Consultorio enfermería Servicio Extramural San Lorenzo	1722	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015695	Consultorio medicina Servicio Extramural Santa Helena	1718	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015637	Consultorio enfermería Servicio Extramural Santa Helena	1717	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 349KLX 3500015599	Consultorio medicina Servicio Extramural Siratá	1716	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000005129	Consultorio de medicina 1 centro amigable sede Principal	1235	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000018578	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	1191	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 3500015638	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	1219	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000002127	Consultorio de enfermería centro amigable sede Principal	1271	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000001448	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	1391	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 500KL 5000001462	Consultorio de medicina prioritaria 2 sede Principal	1309	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL Marca: HEALTH O METER Modelo: 522KL PESA BEBES Serie: 5220001234	Consultorio medicina Servicio Extramural Avenidaños 1	2568	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220000225	Consultorio medicina Servicio Extramural La Trinidad	2084	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.

BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220000245	Consultorio medicina Servicio Extramural San Lorenzo	2113	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 522000818	Consultorio medicina Servicio Extramural Santa Helena	686	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 522000360	Consultorio medicina Servicio Extramural La Florida	1587	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220001233	Consultorio de medicina 5 sede Principal	417	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220001255	Consultorio de medicina 9 sede Principal	211	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220000424	Sala de lactancia sede Principal	2033	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.

BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220000250	Consultorio de enfermería 3 sede Principal	440	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 522KL PESA BEBES 5220001243	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	1390	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes (plataforma). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula, si es necesario reajuste. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 100KL 1000005590	Desplazamientos Enfermería sede Principal	3507	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración del 01 al 30 de Mayo del 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 100KL 1000005674	Salud Pública (PIC) sede Principal	3509	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración del 01 al 30 de Mayo del 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 100KL 1000005676	Salud Pública (PIC) sede Principal	3510	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración del 01 al 30 de Mayo del 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 100KL 1000005675	Salud Pública (PIC) sede Principal	3511	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración del 01 al 30 de Mayo del 2021.

BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 100KL 1000005602	Salud Pública (PIC) sede Principal	3512	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración del 01 al 30 de Mayo del 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 100KL 1000005664	Salud Pública (PIC) sede Principal	3517	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración del 01 al 30 de Mayo del 2021.
BALANZA DIGITAL HEALTH O METER 142KL 1420052794	Sala EDA	2969	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración del 01 al 30 de Mayo del 2021.
BALANZA DIGITAL SOEHNLE ANALOGA N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural Siratá	2289	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL TANITA HA-520 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	2736	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL TANITA HA-520 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	2737	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.

BALANZA DIGITAL TANITA HA-520 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	2739	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL TANITA HA-520 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	2740	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL SOEHNLE ESTÁNDAR MF71015	Salud Pública (PIC) sede Principal	2490	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL TANITA HA-520 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	2730	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL TANITA HA-520 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	2729	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL TANITA HA-520 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	2728	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.

BALANZA DIGITAL TANITA HA-520 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	2726	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL TEZZIO PISO QC PASS07	Unidad Móvil 2	2887	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
BALANZA DIGITAL TANITA HA-520 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	2734	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar que la báscula cuente con todos sus componentes. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar el sistema mecánico y eléctrico o electrónico según corresponda. Lubricar el sistema mecánico. Verificar la calibración de "cero" de la báscula. Verificar la calibración de la báscula con un peso conocido. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
BAÑO SEROLÓGICO MEMMERT WNB7 DIN12876-3-K1	Toma de Muestras	1055	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar equipos y accesorios metálicos o sintéticos (tapadera, sellos o empaques, aisladores térmicos). Revisar conexiones eléctricas y accesorios (conductores y enchufes). Verificar control automático de temperatura. Limpie los contactos electrónicos si es el caso. Asegúrese de la buena conducción eléctrica en el sistema de potencia. Inspeccionar lámparas de señalización. Comprobar tiempo de alcance de temperatura. Verificar el funcionamiento del equipo.
BAÑO SEROLÓGICO MEMMERT W200 DIN12877-K1	Toma de Muestras	1053	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Verificar tipo de agua utilizada para evitar corrosiones, se sugiere agua destilada. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar equipos y accesorios metálicos o sintéticos (tapadera, sellos o empaques, aisladores térmicos). Revisar conexiones eléctricas y accesorios (conductores y enchufes). Verificar control automático de temperatura. Limpie los contactos electrónicos si es el caso. Asegúrese de la buena conducción eléctrica en el sistema de potencia. Inspeccionar lámparas de señalización. Comprobar tiempo de alcance de temperatura. Verificar el funcionamiento del equipo.
CABINA DE FLUJO LAMINAR ESCO AHC- 4D2 2011-56720	Toma de Muestras	1040	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verificación y limpieza de circuitos eléctricos, cambio de filtro epa, revisión de motor, limpieza, pruebas de funcionamiento, limpieza general.

CAVITRÓN DENTSPLY GEN 130 PRO 130-26534	Consultorio de odontología 1 sede Principal	674	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar cable de alimentación eléctrica. Revisar el conector del pedal. Verificar solenoide y válvula de aguja. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta. Revisar la punta. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
CAVITRÓN DENTSPLY GEN 130 PRO 130-26528	Consultorio de odontología pyp sede Principal	625	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar cable de alimentación eléctrica. Revisar el conector del pedal. Verificar solenoide y válvula de aguja. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta. Revisar la punta. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
CAVITRÓN DENTSPLY GEN 130 PRO 130-26518	Consultorio de odontología pyp sede Principal	595	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar cable de alimentación eléctrica. Revisar el conector del pedal. Verificar solenoide y válvula de aguja. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta. Revisar la punta. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
CAVITRÓN DENTSPLY GEN 130 PRO 130-26523	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	1211	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar cable de alimentación eléctrica. Revisar el conector del pedal. Verificar solenoide y válvula de aguja. Revisar cable eléctrico que conecta con la bobina de la punta. Revisar la punta. Limpiar agujero de salida de agua de punta de aplicación. Revisar que las chapas magnéticas de las puntas no estén desoldadas del extremo inferior. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
CENTRIFUGA CLAY ADAMS DYNAC III 4710009	Toma de Muestras	1063	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar conexiones eléctricas, internas y externas. Verificar perillas de control y señalizaciones. Revisar el motor y sus componentes (carbones, baleros, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario. Verificar el balance del plato con carga. Realizar calibración de tubos con una balanza y enfrentar sus pesos. Verificar medidor de tiempo. Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango (máximo 3,500 - 4,500 r.p.m.). Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo (inspección de ruidos o vibraciones inusuales).

CENTRIFUGA HEMATOCRITO HETTICH HAEMATOCRIT D-78532	Toma de Muestras	1061	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar conexiones eléctricas, internas y externas. Verificar perillas de control y señalizaciones. Revisar el motor y sus componentes (carbones, baleros, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario. Verificar el balance del plato con carga. Realizar calibración de tubos con una balanza y enfrentar sus pesos. Verificar medidor de tiempo. Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango (máximo 3,500 - 4,500 r.p.m.). Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo (inspección de ruidos o vibraciones inusuales).
CENTRIFUGA CLAY ADAMS DYNAC III A 524063	Toma de Muestras	3248	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar partes y accesorios metálicos y sintéticos (soportes, cabezal, tapadera, empaques, portatubos, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Revisar conexiones eléctricas, internas y externas. Verificar perillas de control y señalizaciones. Revisar el motor y sus componentes (carbones, baleros, eje, acoplamiento, etc.), cambiar carbones y lubricar si es necesario. Verificar el balance del plato con carga. Realizar calibración de tubos con una balanza y enfrentar sus pesos. Verificar medidor de tiempo. Verificar la velocidad de funcionamiento en todo el rango (máximo 3,500 - 4,500 r.p.m.). Comprobar sistema de frenado y mecanismos de seguridad. Comprobar operatividad de la unidad en todos los modos de trabajo (inspección de ruidos o vibraciones inusuales).
CONTADOR DE CELULAS KRAMER IMP-001 1355901/ 414	Toma de Muestras	1043	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza de tarjetas electrónicas, ajuste de conectores si se requiere, pruebas de funcionamiento del equipo, limpieza general.
DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1+ FD1PX0343498-10	Consultorio de medicina gestantes sede Principal	488	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1+ FD1PX0341114-10	Consultorio de medicina 1 centro amigable sede Principal	1231	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1+ FD1PX0341121-10	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	1188	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1+ FD1PX0341116-10	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	1385	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
DOPPLER FETAL HUNTLEIGH FD1+ N.R.	Desplazamientos Medicina sede Principal	1806	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar externamente (cable, conector, transductor, carcasa, pantalla y parlante). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar circuitos de control eléctricos y/o electrónicos. Efectuar revisión del transductor. Verificar intensidad de sonido del parlante. Verificar estado de batería de alimentación (9V DC). Verificar el funcionamiento del equipo. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-601C 360251-M1841402000	Sala de ECG	3600	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verificar tensión de entrada o voltaje de baterías. Revisión de estabilidad del soporte del equipo. Revisión del correcto funcionamiento panel frontal y teclas de mando. Verificación funcionamiento de electrodos, cables y fusibles. Revisión y limpieza de tarjeta electrónica. Verificación de respuesta, calidad de trazo, impresión y transporte del papel. Limpieza general.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 19090 29000	Ambulancia sede Principal	6833	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 19090 N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	N.R.	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 N.R.	Consultorio de medicina 1 sede Principal	330	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 2 sede Principal	197	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 3 sede Principal	256	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 4 sede Principal	340	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 5 sede Principal	344	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 6 sede Principal	350	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 7 sede Principal	251	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 8 sede Principal	246	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 9 sede Principal	353	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 10 sede Principal	464	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 11 sede Principal	690	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina gestantes sede Principal	567	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de enfermería 3 sede Principal	4476	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 1 centro amigable sede Principal	359	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	367	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	375	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Consultorio de medicina prioritaria 2 sede Principal	385	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Desplazamientos Medicina sede Principal	689	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.

EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN 13010 95001	Desplazamientos Enfermería sede Principal	688	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se inspeccionan las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa e interna del otoscopio. Se realiza la limpieza integral externa e interna del oftalmoscopio. Se verifica el estado de los lentes del oftalmoscopio. Se hace la revisión del estado de los bombillos del otoscopio y del oftalmoscopio. Se revisa el estado de las baterías (AA). Se entrega el equipo funcionando adecuadamente.
EQUIPO DE RAYOS X ODONTOLOGICO / PERIAPICAL FIAD FIAD FIRENCE BNBZ ZCYD0011	Sala de rayos X odontológico sede Principal	3632	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar conector de tubo de rayos X. Verificar estado de cable de alimentación eléctrica, fusible y demás componentes eléctricos y electrónicos. Verificar estado de perillas, y lámpara indicadora. Lubricar articulación de brazo portatubo, si es necesario. Verificar funcionamiento del compensador de voltaje de línea. Verificar corrientes del tubo y tiempo de exposición. Verificar funcionamiento con el operador del equipo.
FONENDOSCOPIO N.R. N.R. N.R.	Consultorio de medicina 2 sede Principal	198	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO ALPK2 N.R. N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	640	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO ALPK2 N.R. N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	639	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO ALPK2 N.R. N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	638	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO ALPK2 N.R. N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	637	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO ALPK2 N.R. N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	636	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO ALPK2 N.R. N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	635	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

FONENDOSCOPIO ALPK2 N.R. N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	623	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO ALPK2 N.R. N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	622	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO ALPK2 N.R. N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	621	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO ALPK2 N.R. N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	620	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO ALPK2 N.R. N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	619	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO ALPK2 N.R. N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	618	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO ALPK2 N.R. N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	617	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 1 sede Principal	331	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 3 sede Principal	257	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 4 sede Principal	340	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 5 sede Principal	345	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 6 sede Principal	351	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 7 sede Principal	252	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 8 sede Principal	247	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 9 sede Principal	354	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 10 sede Principal	465	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 11 sede Principal	840	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina gestantes sede Principal	568	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de enfermería 1 sede Principal	556	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de enfermería 3 sede Principal	4478	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 1 centro amigable sede Principal	360	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	4444	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de enfermería centro amigable sede Principal	6500	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	839	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Consultorio de medicina prioritaria 2 sede Principal	377	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Sala de procedimientos menores sede Principal	670	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Desplazamientos Enfermería sede Principal	841	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LITTMANN 2450 N.R.	Desplazamientos Medicina sede Principal	N.R.	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LORD ADULTO N.R.	Unidad Móvil 2	N.R.	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO N.R. ADULTO N.R.	Ambulancia sede Principal	N.R.	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO N.R. ADULTO N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	N.R.	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LORD PEDIÁTRICO N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	N.R.	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO LORD PEDIÁTRICO N.R.	Consultorio de medicina 5 sede Principal	N.R.	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general

FONENDOSCOPIO N.R. PEDIÁTRICO N.R.	Ambulancia sede Principal	N.R.	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO WELCH ALLYN PEDIÁTRICO N.R.	Sala ERA 2 sede Principal	6512	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO WELCH ALLYN PEDIÁTRICO N.R.	Consultorio de enfermería 2 sede Principal	N.R.	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
FONENDOSCOPIO WELCH ALLYN PEDIÁTRICO N.R.	Sala ERA 1 sede Principal	693	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de ductos de la manguera. Revisión estado de la membrana. Revisión estado de las olivas. Verificar que la manguera no esté cristalizada o porosa. Limpieza general
GLUCOMETRO ON CALL PLUS PLUS N.R.	Laboratorio clínico sede Principal	N.R.	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza externa del equipo. Revisión de tarjeta electrónica y batería. Revisión de parámetros. Pruebas de funcionamiento y operatividad. Limpieza general
GLUCOMETRO ON CALL PLUS PLUS N.R.	Desplazamientos Medicina sede Principal	N.R.	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión y limpieza externa del equipo. Revisión de tarjeta electrónica y batería. Revisión de parámetros. Pruebas de funcionamiento y operatividad. Limpieza general
INCUBADORA CULTIVOS BINDER BD53 06-00869	Laboratorio clínico sede Principal	1038	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.). Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador, circuitos integrados, etc.). Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores. Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del equipo, según corresponda. Verificar protecciones y alarmas cuando corresponda (sobretemperatura, no circulación del aire, etc.). Medir voltaje de alimentación y corriente de consumo. Medir resistencia de carcasa a tierra (d 0.5:). Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador.
INCUBADORA BIOLÓGICOS EZ TEST 1401 8012456	Esterilización sede Principal	313	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.). Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador, circuitos integrados, etc.). Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores. Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del equipo, según corresponda. Verificar protecciones y alarmas cuando corresponda (sobretemperatura, no circulación del aire, etc.). Medir voltaje de alimentación y corriente de consumo. Medir resistencia de carcasa a tierra (d 0.5:). Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador.

INCUBADORA 3M 390 70200771809 / 309513	Esterilización sede Principal	3208	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Revisar elementos metálicos o sintéticos (puertas, sellos, empaques, salidas de aire, manivela, etc.). Revisar componentes eléctricos y electrónicos (cordón de alimentación, tomacorriente, calefactor, ventilador, circuitos integrados, etc.). Revisar estado y funcionamiento de perillas, interruptores e indicadores. Verificar temperatura de funcionamiento de la cámara y calibración del termómetro del equipo, según corresponda. Verificar protecciones y alarmas cuando corresponda (sobretensión, no circulación del aire, etc.). Medir voltaje de alimentación y corriente de consumo. Medir resistencia de carcasa a tierra (d 0.5:). Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador.
INFANTOMETRO SECA 417 N.R.	Consultorio de medicina 5 sede Principal	3681	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Limpieza integral externa del equipo, incluyendo el quite del tope para los pies para eliminar cualquier suciedad en los rieles de guía. Revisar el estado del mecanismo de plegado del equipo. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Verificar que los topes de la cabeza y los pies se encuentren en buen estado. Revisar que el riel de la guía de tope de los pies, sube y baja con precisión y suavidad.
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio medicina Servicio Extramural Avenida 1	2139	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Florida	1988	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Trinidad	2112	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)

LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural San Lorenzo	1968	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio enfermería Servicio Extramural Santa Helena	2441	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	2888	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio de enfermería 1 sede Principal	1675	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Consultorio de enfermería centro amigable sede Principal	2205	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)
LÁMPARA CUELLO DE CISNE KRAMER PISO N.R.	Sala de procedimientos menores sede Principal	1967	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Inspeccionar el cuerpo y la base del equipo. Revisar la pantalla reflejante. Verificar el cable de alimentación y su polarización a tierra (medir resistencia a tierra: d 0.5:). Verificar el interruptor de encendido/apagado. Verificar posicionamiento y flexibilidad del cuello de ganso de la lámpara. Verificar el voltaje en el bombillo o foco. Efectuar un reapreté de tuercas y tornillos (si es necesario)

LÁMPARA FOTOCURADO DENTAMERICA LITEX 680A 6858528	Consultorio de odontología 1 sede Principal	713	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watimetro o con el Luxometro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTAMERICA LITEX 680A 6822019	Consultorio de odontología 7 sede Principal	613	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watimetro o con el Luxometro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTAMERICA LITEX 680A 6858808	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	1210	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watimetro o con el Luxometro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTAMERICA LITEX 680A 6858667	Desplazamientos Odontologia sede Principal	2282	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watimetro o con el Luxometro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTAMERICA LITEX 695A 10715	Consultorio de odontología 5 sede Principal	641	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watimetro o con el Luxometro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	N.R.	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watimetro o con el Luxometro.

LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 506-36531	Unidad móvil 2 sede Principal	577	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watimetro o con el Luxometro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 506-36527	Consultorio de odontología 2 sede Principal	1449	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watimetro o con el Luxometro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 506-36533	Consultorio de odontología 3 sede Principal	592	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watimetro o con el Luxometro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 506-36537	Consultorio de odontología 4 sede Principal	1448	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watimetro o con el Luxometro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 506-36529	Consultorio de odontología 6 sede Principal	1450	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watimetro o con el Luxometro.
LÁMPARA FOTOCURADO DENTSPLY QHL75 506-36526	Consultorio de odontología pyp sede Principal	1454	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Revisar condición física del equipo (impactos físicos, pintura, etc.). Efectuar limpieza integral interna del equipo. Verificar cable de alimentación eléctrica y demás componentes eléctricos o electrónicos. Chequear fuente de luz, limpiar lámpara, filtro de luz ultra violeta y fibra óptica. Verificar si el temporizador cumple con los tiempos prefijados. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación. Mida la intensidad de luz de salida con el Watimetro o con el Luxometro.

MICROPIPETA BRAND TRANSFERPETTE 02J32878 / 01F67537	Laboratorio clínico sede Principal	46	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2021.
MICROPIPETA BRAND TRANSFERPETTE 01F76072	Laboratorio clínico sede Principal	39	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2021.
MICROPIPETA BRAND TRANSFERPETTE 11A1700	Laboratorio clínico sede Principal	35	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2021.
MICROPIPETA HUMAN HUMANPETTE 19125L 03H99998	Laboratorio clínico sede Principal	38	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2021.
MICROPIPETA HUMAN HUMANPETTE 19120L 04H06797	Laboratorio clínico sede Principal	40	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2021.
MICROPIPETA HUMAN HUMANPETTE 19120L 05G76923	Laboratorio clínico sede Principal	36	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2021.

MICROPIPETA HUMAN HUMANPETTE 19130L CR61859	Laboratorio clínico sede Principal	877	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2021.
MICROPIPETA HUMAN HUMANPETTE 19120L CS32748	Laboratorio clínico sede Principal	876	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar desarme y destape de conductos, Efectuar limpieza integral interna y externa de la micropipeta. Efectuar lubricación de vastago y partes necesarias. Verificar estado de elementos. Realizar pruebas de pipeteado. Pruebas de operación con el operador. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Noviembre de 2021.
MICROSCOPIO OLYMPUS CX21FS1 2J00328	Laboratorio clínico sede Principal	1067	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa. Limpiar Cto optico (oculares, objetivos, condensador, filtros). Efectuar inspección externa del equipo (tornillos, macrométricos, micrométricos, desplazamiento de porta laminas, aspecto físico en general). Efectuar limpieza integral interna (excepto sistema óptico). Revisar sistema eléctrico (transformador, conductores, conectores) cambiar elementos con signos de deterioro. Comprobar apertura del diafragma, iris y montaje del condensador, ajustar y lubricar si es necesario. Verificar los desplazamientos mecánicos para movimientos suaves, enfoque, platina porta objetos. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador. Enfocar lámina y observar en 4x, 10x, 40x y 100x con aceite de inmersión.
MICROSCOPIO OLYMPUS CHS 4D0035	Laboratorio clínico sede Principal	1069	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa. Limpiar Cto optico (oculares, objetivos, condensador, filtros). Efectuar inspección externa del equipo (tornillos, macrométricos, micrométricos, desplazamiento de porta laminas, aspecto físico en general). Efectuar limpieza integral interna (excepto sistema óptico). Revisar sistema eléctrico (transformador, conductores, conectores) cambiar elementos con signos de deterioro. Comprobar apertura del diafragma, iris y montaje del condensador, ajustar y lubricar si es necesario. Verificar los desplazamientos mecánicos para movimientos suaves, enfoque, platina porta objetos. Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el Operador. Enfocar lámina y observar en 4x, 10x, 40x y 100x con aceite de inmersión.
NEBULIZADOR THOMAS 1125 20600008517	Ambulancia sede Principal	2270	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Inspeccionar partes mecánicas. Inspeccionar sistema eléctrico y accesorios (cordón de alimentación, devanados del motor, etc.). Inspeccionar válvulas unidireccionales. Limpiar cámaras y verificar su sello. Revisar filtro bacteriológico y filtro silenciador, cambiar si es necesario. Inspeccionar fugas en el sistema de vacío (mangueras, empaques de hule y acoples). Verificar flujo máximo [lts./min]. Verificar rango de vacío [seg./mm. Hg]. Verificar el funcionamiento del equipo.

MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN M50 333123-M15503310017	Ambulancia sede Principal	3045	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el Equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Inspeccionar el equipo en forma externa. Efectuar limpieza integral interna del equipo. Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos (cable de Alimentación, tomacorriente, cables de paciente, etc.). Verificar el funcionamiento de selección de parámetros de NIBP, SPO2, TEM, ECG, Con paciente o simulador verifique cada uno de los parámetros antes mencionados para garantizar que los está detectando y registrando adecuadamente. Para esto compruebe los parámetros seleccionados con los valores registrados. Verificar el funcionamiento del sensor y pinza spO2. Compruebe el funcionamiento de cada uno de los botones, selectores e indicadores, según sea el caso. Verificar la correcta operación audible y visual de las alarmas en cada uno de los parámetros que posea el equipo. Realizar los test de comprobación de parámetros desde el menú de servicio si es el caso. Verificar con varias mediciones la calibración del NIBP. verificar estado y carga de batería. Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Avendaños 1	2691	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural La Trinidad	7250	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Santa Helena	2689	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Siratá	1962	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	2886	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	2893	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Sala de rayos X odontológico sede Principal	1916	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
NEGATOSCOPIO ARDENT 1 CUERPO N.R.	Oficina Mantenimiento sede Principal	1839	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Revisión de continuidad en el cableado, Revisión de bombillo e interruptor on-off, limpieza de la pantalla de acrílico y revisión de balastos.
OXIMETRO DE PULSO RIESTER RI-FOX N 901362	Ambulancia sede Principal	429	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.

OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 316036-M13300290033	Sala ERA 2 sede Principal	2724	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
OXIMETRO DE PULSO HUNTLEIGH SMARTSIGNS MINIPULSE	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	1386	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
OXIMETRO DE PULSO EDAN H100B 316036-M1330020033	Sala ERA 1 sede Principal	2859	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
OXIMETRO DE PULSO KONICA MINOLTA PULSOX-2 32864	Desplazamientos Medicina sede Principal	4492	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Limpieza de sensor de saturación, verificar su estado físico, revisión de batería, pruebas de funcionamiento, comparación de parámetros. Fecha de calibración: 01 al 30 de mayo de 2021.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	N.R.	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio de odontología 1 sede Principal	1098	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio de odontología 2 sede Principal	4501	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio de odontología 3 sede Principal	4499	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.

PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio de odontología 4 sede Principal	4497	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio de fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio de odontología 5 sede Principal	No registra	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio de fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio de odontología 6 sede Principal	6198	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio de fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio de odontología 7 sede Principal	No registra	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio de fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio de odontología pyp sede Principal	1179	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio de fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	4936	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubríquela directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambio de fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.

PIEZA DE MANO DE ALTA NSK PANAIR MINI N.R.	Desplazamientos Odontología sede Principal	N.R.	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Retire la turbina y lubriquel directamente con aceite adecuado. Verifique que la pieza de mano sostiene adecuadamente la fresa, y que funciona con su cambia fresas adecuado. Ponga en operación la pieza y verifique el correcto sonido de la turbina con una irrigación adecuada de agua. Compruebe la fuerza que posee la pieza con ayuda del operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	N.R.	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra angulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología 1 sede Principal	N.R.	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra angulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología 2 sede Principal	N.R.	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra angulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología 3 sede Principal	444	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra angulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología 4 sede Principal	N.R.	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra angulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.

PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología 5 sede Principal	449	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra angulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología 6 sede Principal	4482	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra angulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología 7 sede Principal	N.R.	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra angulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología pyp sede Principal	1621	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra angulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología pyp sede Principal	1622	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra angulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología pyp sede Principal	4483	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra angulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.

PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	N.R.	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra angulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
PIEZA DE MANO DE BAJA NSK EX-203C N.R.	Desplazamientos Odontología sede Principal	N.R.	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Verifique el estado externo de la pieza verificando golpes o cualquier anomalía. Verifique que tenga empaque trasero y que se encuentra en perfecto estado. Reemplace si es necesario. Desarme y lubrique la turbina del micromotor comprobando que los resortes y las aspas no se pegan. Lubrique y compruebe el estado de los rodamientos del micromotor. Lubrique el contra ángulo de punta recta y el de tipo U. Coloque un pimpollo para verificar el estado de los pines de sujeción. Reemplace si es necesario, Coloque una copa o un cepillo para verificar el estado de la cabeza del contra angulo tipo U. Compruebe el funcionamiento con el operador.
SUCCIONADOR SILFAB N8V 10-0105-07-A	Ambulancia sede Principal	61	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. Inspeccionar partes mecánicas (Rodamientos, sellos, fuelle, viela, anillos). Inspeccionar sistema eléctrico y accesorios (cordón de alimentación, devanados del motor, carbones, etc.). Inspeccionar válvulas unidireccionales. Limpiar cámaras y verificar su sello. Revisar filtro bacteriológico y filtro silenciador, cambiar si es necesario. Revisar sellado de nivel de líquido. Revisar nivel de aceite del motor, lubricar si es necesario. Inspeccionar fugas en el sistema de vacío (mangueras, frascos, empaques de hule y acoples). Verificar flujo máximo [lts./min]. Verificar rango de vacío [seg./mm. Hg]. Verificar el funcionamiento del equipo.
TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio de medicina 1 sede Principal	3674	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizan con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio de medicina 3 sede Principal	3675	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizan con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.

TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio de medicina 6 sede Principal	3676	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio de medicina 8 sede Principal	3677	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio de medicina 11 sede Principal	3678	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio de medicina gestantes sede Principal	3680	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TALLÍMETRO SECA 213 N.R.	Consultorio PyP Enfermería 4	3679	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Examinar externamente el equipo para evidenciar la integridad de la calidad del material. Realizar limpieza integral externa del equipo. Verificar que este nivelada la placa de base. Revisar que la corredera y el tope de la cabeza se encuentre en buen estado y que se deslizen con gran suavidad. Verificar que la escala se encuentre en buen estado y que no presente partes borrosas en su impresión. Entregar el equipo funcionando correctamente.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4991	Consultorio de medicina 10 sede Principal	414	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4645	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	1190	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4992	Sala de procedimientos menores sede Principal	1349	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 1969 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	T32	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 1969 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	T31	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 1969 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	T30	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 1969 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	T29	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

TENSIOMETRO ALPK2 1969 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	T28	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 1969 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	T27	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 1969 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	T26	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 1969 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	T25	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 1969 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	T24	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 1969 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	T23	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

TENSIOMETRO ALPK2 1969 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	T22	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, peras, válvulas, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 1969 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	T21	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, peras, válvulas, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 1969 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	T20	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, peras, válvulas, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 1969 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	T19	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, peras, válvulas, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 1969 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	T18	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, peras, válvulas, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 1969 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	T17	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, peras, válvulas, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

TENSIOMETRO ALPK2 1969 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	T16	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 1969 N.R.	Salud Pública (PIC) sede Principal	7194	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4816	Consultorio de medicina 2 sede Principal	28	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4506	Consultorio de medicina 3 sede Principal	57	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 80818195622	Consultorio de medicina 3 sede Principal	258	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4827	Consultorio de medicina 4 sede Principal	81	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4663	Consultorio de medicina 5 sede Principal	106	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4508	Consultorio de medicina 6 sede Principal	132	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4999	Consultorio de medicina 7 sede Principal	161	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4834	Consultorio de medicina 9 sede Principal	202	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4582	Consultorio de medicina 11 sede Principal	1686	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4700	Consultorio de enfermería 3 sede Principal	438	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4917	Consultorio de medicina 1 centro amigable sede Principal	1233	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4906	Consultorio de medicina prioritaria 2 sede Principal	1307	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 5011	Sala de procedimientos menores sede Principal	1364	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 5060	Consultorio medicina Servicio Extramural Avenida 1	1687	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 5060	Consultorio medicina Servicio Extramural La Florida	1680	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4884	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Florida	1684	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4952	Consultorio medicina Servicio Extramural La Trinidad	1676	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4738	Consultorio enfermería Servicio Extramural La Trinidad	1677	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4821	Consultorio medicina Servicio Extramural San Lorenzo	1685	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4969	Consultorio enfermería Servicio Extramural San Lorenzo	1683	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4822	Consultorio medicina Servicio Extramural Santa Helena	1679	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4517	Consultorio enfermería Servicio Extramural Santa Helena	1678	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4601	Consultorio medicina Servicio Extramural Siratá	1681	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	2885	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4714	Consultorio de medicina 1 sede Principal	2	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 500W2 4662	Consultorio de medicina 8 sede Principal	177	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO LORD ADULTO N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	N.R.	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO LORD ADULTO N.R.	Ambulancia sede Principal	N.R.	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

TENSIOMETRO ALPK2 PEDIÁTRICO 271373	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	370	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 PEDIÁTRICO 271816	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	379	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 PEDIÁTRICO N.R.	Consultorio de medicina 10 sede Principal	N.R.	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 PEDIÁTRICO 271861	Consultorio de medicina 9 sede Principal	355	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO ALPK2 PEDIÁTRICO 264314	Consultorio de enfermería 3 sede Principal	6862	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO LORD PEDIÁTRICO N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	N.R.	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

TENSIOMETRO WELCH ALLYN 297 91207172711	Sala ERA 2 sede Principal	4575	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN N.R. 140207090553	Sala ERA 1 sede Principal	697	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN SHOCK RESISTANT 91217062331	Desplazamientos Medicina sede Principal	4573	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN SHOCK RESISTANT 91217062331	Desplazamientos Enfermería sede Principal	4574	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO TYCOS ADULTO 9601092187	Consultorio de medicina prioritaria 1 sede Principal	7190	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO TYCOS PEDIÁTRICO 9408230229	Sala de procedimientos menores sede Principal	1360	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 N.R.	Ambulancia sede Principal	106	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 90918195622	Consultorio de medicina 2 sede Principal	29	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 9410201197	Consultorio de medicina 5 sede Principal	346	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 61128070892	Consultorio de medicina gestantes sede Principal	569	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 61116215301	Consultorio de enfermería 1 sede Principal	563	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 N.R.	Consultorio de enfermería 2 sede Principal	N.R.	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 80808203631	Consultorio de medicina 1 centro amigable sede Principal	361	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 80617171243	Consultorio de medicina 2 centro amigable sede Principal	369	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 70227185281	Consultorio de enfermería centro amigable sede Principal	6870	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 N.R.	Sala ERA 1 sede Principal	696	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 70227185281	Sala de rehidratación oral sede Principal	378	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 110802134	Desplazamientos Enfermería sede Principal	7195	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazaletes, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.

TENSIOMETRO WELCH ALLYN ML 182 1,10329E+11	Desplazamientos Medicina sede Principal	7137	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se procede a inspeccionar la condición física del equipo en general. Se efectúa limpieza integral externa e interna del equipo. Se inspeccionan los siguientes componentes del equipo: brazalete, pera, válvula, mangueras y manómetro. Se realiza la verificación de fugas en el equipo. Se hace la verificación de la medida del manómetro con patrón certificado. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente. Fecha de Calibración: 01 al 30 de Mayo de 2021.
UNIDAD ODONTOLÓGICA ARDENT N.R. N.R.	Unidad móvil 2 sede Principal	2894	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL OD PORTATIL OD-2 SIN 618290	Oficina Mantenimiento sede Principal	2415	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL ZUBI-OLA N.R. N.R.	Oficina Mantenimiento sede Principal	1699	Cuatrimstral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

UNIDAD ODONTOLÓGICA INDUSDENTAL N.R. N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Avendaños 1	2280	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA ESQCAM N.R. N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural La Florida	1930	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA ESQCAM N.R. N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural La Trinidad	3287	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA DINAMIK 626 N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural San Lorenzo	3289	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

UNIDAD ODONTOLÓGICA INDUSDENTAL N.R. N.R.	Consultorio odontología Servicio Extramural Santa Helena	2366	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA DINAMIK V-920 20057 1345	Consultorio odontología Servicio Extramural Siratá	3285	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011395	Consultorio de odontología 1 sede Principal	710	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011401	Consultorio de odontología 2 sede Principal	691	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011410	Consultorio de odontología 3 sede Principal	669	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011402	Consultorio de odontología 4 sede Principal	653	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011429	Consultorio de odontología 5 sede Principal	637	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011414	Consultorio de odontología 6 sede Principal	590	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011430	Consultorio de odontología 7 sede Principal	573	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA GNATUS CADEIRA SYNCRUS 4483598001	Consultorio de odontología pyp sede Principal	622	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RE11011424	Consultorio de odontología pyp sede Principal	611	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.
UNIDAD ODONTOLÓGICA RITTER EXCELLENCE RS08090154	Consultorio de odontología centro amigable sede Principal	1206	Cuatrimestral (1° y 2° Visita) / Trimestral (3° visita)	15 al 30	04 08 11	2021	Gerente / contratista	Se hace la inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo. Se procede a realizar la limpieza integral externa incluyendo la silla del operador. Se verifica el estado de mangueras de modulo y escupidera. Se lubrican las válvulas piloto, on-off, cambia vías y reguladora de agua. Se verifica el funcionamiento del pedal neumático. Se hace la verificación de funcionamiento del sistema de drenaje (eyector y escupidera) y seguidamente se efectúa limpieza de éste. Se limpian los contactos del bombillo de la lámpara y se verifica la conexión eléctrica de la toma, transformador e interruptor. Se verifique el voltaje de alimentación del transformador y del bombillo. Se hace la limpieza de contactos. Se realiza la lubricación y ajuste de motores, bujes, ejes, piñones y electroválvulas responsables del movimiento de la silla. Se entrega el equipo funcionando adecuadamente en conjunto con el operador.

Observaciones: el intervalo de mantenimiento en las dos primeras fechas se va a realizar de manera cuatrimestral y la ultima de manera trimestral para garantizar que se realice el mantenimiento de los equipos biomédicos en la vigencia del año 2021 ya que si se realizan las 3 fechas de manera cutrimestral la ultima fecha se programaría en diciembre de 2021 y se corre el riesgo el cumplimiento de las actividades del ultimo mantenimiento generando retrasos en la entrega de reportes y actividades de mantenimiento.



DIRECTOR/GERENTE



JEFE DE MANTENIMIENTO